


Comment utiliser l'application Diabetedroid :

Après avoir ouvert l'apk, la première chose à faire est de paramétrer l'application, c'est pourquoi cette page s'ouvre en premier à la première utilisation. Cela permet d'activer la fonction d'envoi automatique des messages contenant le récapitulatif et de mettre des taux de bases aux différentes heures de la journée.



Avant de rentrer le taux, il faut d'abord sélectionner le moment de la journée puis rentrer le taux et la dose (si celle-ci est à modifier) puis le confirmer en appuyant sur le bouton OK. La date et l'heure sont automatiquement enregistrées.

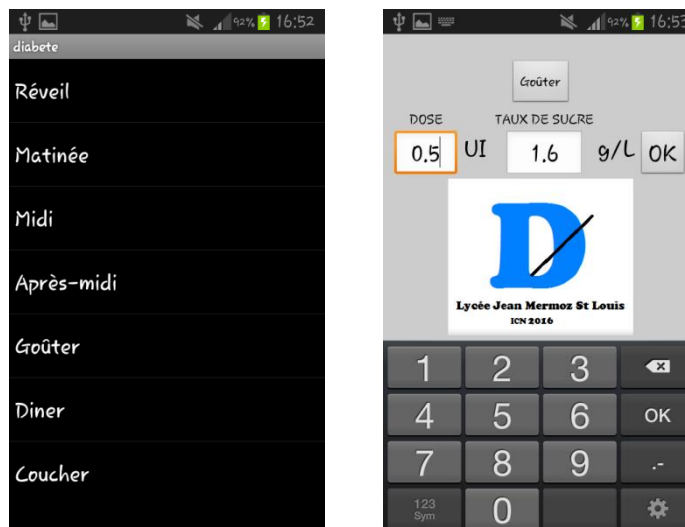




A chaque fois qu'un taux est rentré et confirmé, l'application l'analyse et renvoie le niveau de la glycémie en y associant un avertissement. On peut également voir l'évolution dans la journée du taux sur un graphique.



Il est possible de retrouver les valeurs déjà enregistrées dans deux pages différentes. La première page donne les différents taux sur la journée et sur les journées précédentes. La deuxième page donne les taux consignés dans un tableau permettant de voir l'évolution au fil de la semaine.

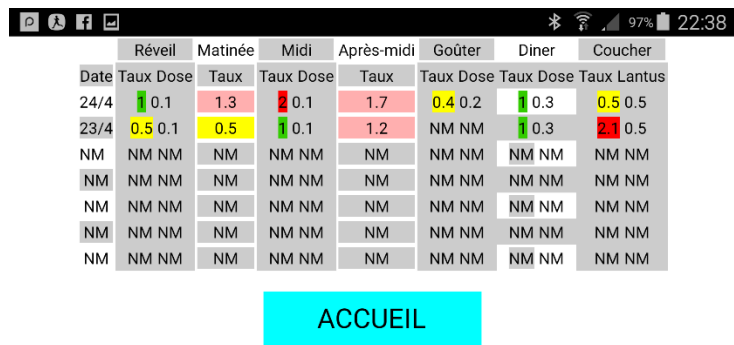	Réveil		Matinée		Midi		Après-midi		Goûter		Diner		Coucher	
Date	Taux	Dose	Taux	Dose	Taux	Dose	Taux	Dose	Taux	Dose	Taux	Dose	Taux	Lantus
24/4	0.1		1.3		0.1		1.7		0.4	0.2	0.3		0.5	0.5
23/4	0.5	0.1	0.5		0.1		1.2		NM	NM	0.3		2.1	0.5
NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM
NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM
NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM
NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM

ACCUEIL



On peut aussi retrouver les taux de la journée sur une courbe en appuyant sur le bouton courbe soit sur la page d'accueil soit sur l'une des pages avec le smiley.

